



Therabody

JetBoots Prime

Instrukcja obsługi

SPIS TREŚCI

1. Informacje o produkcie
2. Zawartość zestawu
3. Zapoznanie z urządzeniem
4. Korzystanie z urządzenia
5. Działanie urządzenia
6. Pielęgnacja, czyszczenie i ładowanie

JetBoots Prime

1. Informacje o produkcie

Odsłoń i zregeneruj swoje nogi za pomocą urządzenia Therabody JetBoots Prime – bezprzewodowego, ultraprzenośnego i wyjątkowo zaprojektowanego do złożenia jak para spodni, dzięki czemu możesz zabrać ze sobą urządzenie do kompresji pneumatycznej w dowolne miejsce. Dostosuj czas zabiegu i ciśnienie do potrzeb swojego ciała, aby przyspieszyć regenerację, zmniejszyć bolesność mięśni i poprawić wydajność przy maksymalnym komforcie i kontroli. Urządzenie jest wyposażone w zastrzeżoną technologię TruGrade™, która zapewnia precyzyjne, sekwencyjne ciśnienie w celu optymalizacji krążenia i usuwania zbędnych metabolitów. Możesz więc po prostu usiąść, zrelaksować się i zregenerować swoje nogi.


Przeznaczenie

Urządzenie Therabody JetBoots Prime to urządzenie do kompresji powietrznej, przeznaczone do stopniowego uciskania nóg. Urządzenie jest wskazane do tymczasowego łagodzenia niewielkich bólów mięśni oraz do tymczasowej poprawy krążenia krwi w obszarze objętym terapią u osób w dobrym stanie zdrowia. Urządzenie symuluje ugniatanie i głaskanie tkanek za pomocą nadmuchiwaney odzieży.

2. Zawartość opakowania


- A** Dwa połączone buty kompresyjne
- B** Kabel do ładowania USB-C do USB-C o długości 2 metrów
- C** Plecak podręczny
- D** Instrukcja obsługi

Uwaga: Urządzenie nie zawiera zasilacza. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy używać zasilacza USB-C o mocy co najmniej 20 W. Upewnij się, że pochodzi on od certyfikowanego producenta i nie został uszkodzony.

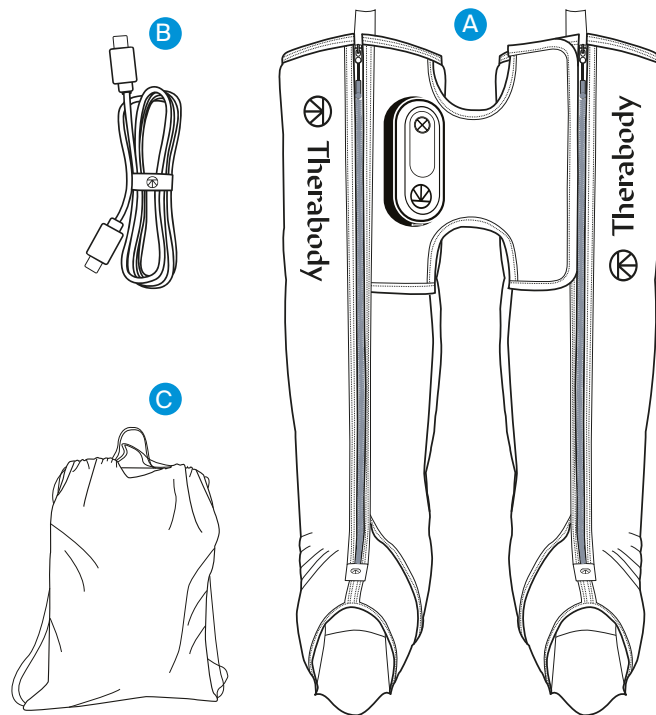

3. Zapoznanie z urządzeniem

- 1 Sterujący but kompresyjny
- 2 Drugi but kompresyjny
- 3 Panel sterowania
 - a Przyciski nawigacyjne (zasilanie, start/pauza, ciśnienie, czas)
 - b Wskaźniki
 - c Port ładowania USB-C
- 4 Materiałowy łącznik
- 5 Kieszenie zewnętrzne
- 6 Główne zamki błyskawiczne
- 7 Pętle do zakładania/zawieszenia

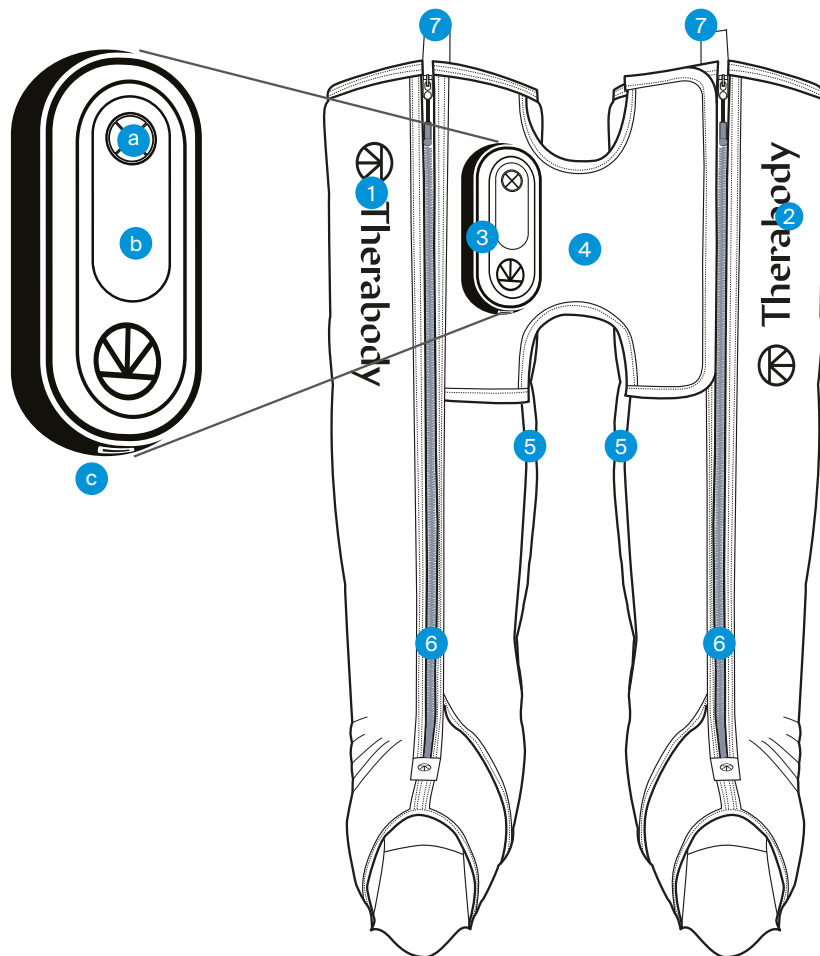


Rysunek 2. Panel sterowania urządzeniem JetBoots Prime

4. Korzystanie z urządzenia

1. **Załóż buty.** Zaleca się noszenie szortów lub cienkich spodni podczas korzystania z urządzenia. Przyjmiń wygodną pozycję, siedząc prosto lub leżąc z wyprostowanymi nogami i stopami w jednej linii z talią. Całkowicie rozepnij buty kompresyjne i umieść każdą nogę i stopę w osobnym butcie. Nogi powinny znajdować się pośrodku każdego buta, a stopy jak najbliżej dna.
2. **Zapnij buty i trzymaj je płasko.** Trzymaj nogi prosto i płasko, aby uniknąć zagięć i fałd. Podczas przenoszenia butów należy trzymać je wyłącznie za krawędzie. Unikaj trzymania urządzenia za panel sterowania. Zapnij oba buty.

****Nie używaj urządzenia stojąc lub chodząc.**

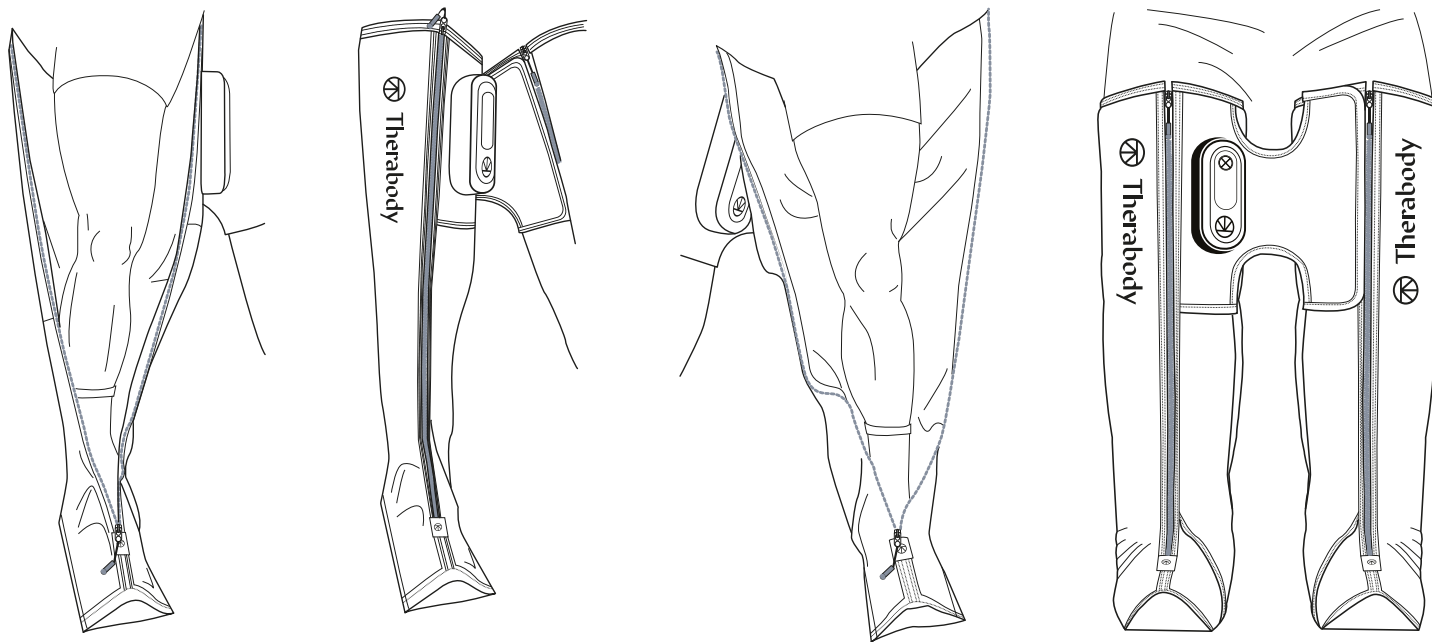

Rysunek 3. Jak umiejscowić nogi w butach kompresyjnych.

3. **Włączanie urządzenia.** Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na panelu sterowania. Wskaźniki LED na panelu sterowania zaświecą się po włączeniu urządzenia. .
4. **Wybierz intensywność nacisku.** Naciśnij przycisk ciśnienia, aby przełączać między czterema opcjami intensywności ciśnienia: 25 mmHg, 50 mmHg, 75 mmHg, 100 mmHg. Ustawienie ciśnienia użyte podczas ostatniego zabiegu stanie się ustawieniem domyślnym dla następnego zabiegu. W razie potrzeby można również zwiększyć lub obniżyć ciśnienie podczas zabiegu.
5. **Wybierz czas zabiegu.** Naciśnij przycisk czasu, aby przełączać między czterema opcjami czasu: 20 minut, 40 minut, 60 minut lub ciągly. Ustawienie czasu użyte podczas ostatniego zabiegu stanie się ustawieniem domyślnym dla następnego zabiegu.
6. **Rozpoczynanie, wstrzymywanie i zakończenie zabiegu.** Rozpocznij terapię naciskając przycisk rozpoczęcia (start). Naciśnij przycisk pauzy w dowolnym momencie, aby wstrzymać zabieg i spuścić powietrze z butów. Ponownie naciśnij przycisk start, aby wznowić zabieg. Naciśnij i przytrzymaj przycisk pauzy, aby zakończyć. Ponowne naciśnięcie przycisku start spowoduje rozpoczęcie zabiegu od początku.
7. **Wyłączanie urządzenia.** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na panelu sterowania, aby wyłączyć urządzenie. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach bezczynności, wyłączając w to zakończone lub wstrzymane zabiegi. Przechowuj buty całkowicie rozpięte.
8. **Blokowanie urządzenia.** Gdy urządzenie nie jest używane lub podczas transportu, należy je zablokować, aby zapobiec jego przypadkowemu włączeniu. Wyłącz urządzenie, aby aktywować funkcję blokady. Trzykrotnie szybko naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić funkcję blokady. Każda dioda LED będzie migać sekwencyjnie, wskazując, że urządzenie jest zablokowane. Aby odblokować urządzenie, należy ponownie trzykrotnie szybko nacisnąć przycisk. Każda dioda LED będzie migać sekwencyjnie (w przeciwnym kierunku), wskazując, że urządzenie jest odblokowane.



Rysunek 4. Interfejs użytkownika dla ustawień

5. Działanie urządzenia


Kompresja pneumatyczna wywiera kontrolowany nacisk na nogi. Nacisk wywierany poprzez sekwencyjne nadmuchiwanie i opróżnianie zwiększa krążenie, co usprawnia naturalne procesy regeneracyjne organizmu, dostarczając więcej tlenu i składników odżywczych do mięśni oraz odprowadzając produkty przemiany materii z mięśni. Ta poprawa krążenia pomaga również zmniejszyć obrzęk i gromadzenie się płynów, co redukuje uczucie sztywności i ciężkości. Z tego względu zabieg kompresji pneumatycznej jest skuteczną metodą regeneracji, szczególnie po aktywności fizycznej.

Technologia JetBoots Prime TruGrade™

Technologia TruGrade™ wykorzystuje zaawansowaną, innowacyjną technologię do dostarczania precyzyjnego ciśnienia - stopniowo w górę nóg, zaczynając od stóp, a kończąc na udach. Każda z czterech komór powietrznych buta kompresyjnego JetBoots Prime zachodzi na siebie, dzięki czemu ciśnienie jest dostarczane sekwencyjnie w górę nogi, bez ryzyka szkodliwych przerw w ciśnieniu. Optymalizuje to krążenie i usuwa odpady metaboliczne w bardziej bezpieczny i skuteczny sposób. Bez względu na rozmiar nogi, użytkownik doświadczy takiego samego ciśnienia przy wyborze tego samego ustawienia zabiegu, jak osoba o innym rozmiarze. Inne systemy zapewniają określoną wartość ciśnienia niezależnie od rozmiaru nogi, co może prowadzić do niebezpiecznego nadmiernego zwężenia i drętwienia. Nasza precyzyjna kontrola ciśnienia nie tylko optymalizuje regenerację, ale także zapewnia bezpieczniejszy masaż.

Jak działa cykl sekwencyjny

Podczas cyklu sekwencyjnego ciśnienie jest stosowane kierunkowo, zaczynając od podstawy (stopy) i postępując w górę (tułów). Gdy komora 1 napełni się i osiągnie ustawiony poziom ciśnienia, urządzenie utrzymuje ciśnienie i rozpoczyna napełnianie komory 2. Urządzenie kontynuuje utrzymywanie ciśnienia w każdej kolejnej komorze, aż do napompowania wszystkich czterech komór. Po napompowaniu wszystkich czterech komór urządzenie zwalnia ciśnienie.

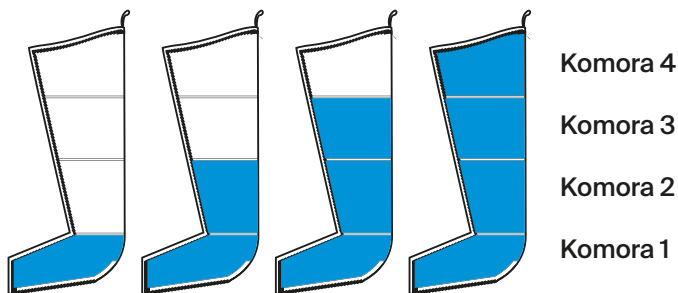

6. Pielęgnacja, czyszczenie i ładowanie

Konserwacja urządzenia

Poniższe instrukcje konserwacji są ważne, aby zapewnić, że urządzenie będzie nadal działać zgodnie z przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować, że urządzenie przestanie działać.

Czyszczenie urządzenia

Buty kompresyjne JetBoots Prime wykonane zostały z nieporowatego materiału klasy medycznej, który pomaga zapobiegać gromadzeniu się bakterii i zapewnia odporną powierzchnię. Wewnętrzne zachodzące na siebie komory zapewniają gładką powierzchnię do czyszczenia, co oznacza brak kłapek w komorach, w których mogą gromadzić się bakterie i nieprzyjemne zapachy.

1. Całkowicie rozpakuj buty i połóż je na płaskiej powierzchni.
2. Do delikatnego czyszczenia wnętrza butów należy używać 70% roztworu alkoholu izopropylowego (IPA). Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie oleju.
3. Wytrzyj obudowę urządzenia miękką, czystą ściereczką, aby zredukować zanieczyszczenia powierzchni.
4. Upewnij się, że po całkowitym wyczyszczeniu urządzenia nie pozostały żadne zanieczyszczenia.
5. Po całkowitym wyczyszczeniu urządzenia należy osuszyć jego powierzchnię i powiesić do całkowitego wyschnięcia przed dalszym użytkowaniem.

Uwaga: Ten produkt NIE jest wodoodporny. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani czyścić go pod bieżącą wodą. Nie należy dopuszczać do kontaktu urządzenia z roztworami żrącymi, które mogą uszkodzić jego wygląd i działanie.

Ładowanie urządzenia


1. Urządzenie obsługuje USB-C i jest dostarczane z kablem ładującym USB-C o długości 2 metry. Urządzenie może być ładowane gdy jest włączone lub wyłączone.
2. Podłącz jeden koniec kabla ładującego do portu ładowania USB-C w urządzeniu. Znajduje się on z boku panelu sterowania. Podłącz drugą stronę do zasilacza USB-C o mocy 20 W, aby uzyskać optymalną wydajność. Korzystanie z zasilacza o mniejszej mocy może uniemożliwić korzystanie z urządzenia podczas ładowania.
3. Gdy urządzenie jest włączone, wskaźniki LED pokażą stan baterii, gdy urządzenie jest włączone lub ładowane. Włącz urządzenie, aby sprawdzić stan baterii.
 - 1 dioda LED: niski poziom naładowania baterii
 - 2 diody LED: średnia bateria
 - 3 diody LED: wysoki poziom naładowania baterii
4. Czas pracy urządzenia na baterii wynosi około 180 minut.

****Uwaga:** W przypadku korzystania z ładowarki innej firmy należy upewnić się, że pochodzi ona od certyfikowanego producenta i nie została uszkodzona.

Przechowywanie i transport urządzenia

1. Połóż urządzenie płasko z panelem sterowania skierowanym do góry i poczekaj, aż buty kompresyjne całkowicie się opróżnią.
2. Złóż prawy but na lewym bucie, tak jak w przypadku pary spodni. Wyrównaj wszystkie krawędzie butów, aby wyglądały jak jeden but.
3. Zaczynając od stóp, złóż je w 1/3 długości nogawki.
4. Złóż jeszcze raz, tak aby zagięcie sięgało górnej części butów. NIE składaj butów zbyt ciasno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie węży i punktów połączeń.
5. Wsuń złożone urządzenie do torby ze sznurkiem. Pociągnij boczne sznurki na zewnątrz, aby zamknąć torbę i nosić ją jako plecak lub pociągnij górne sznurki, aby użyć jej jako torby do przenoszenia..

Przed przechowywaniem należy upewnić się, że urządzenie jest czyste i suche. Aby przechowywać i transportować urządzenie, należy trzymać je w plecaku podróżnym ze sznurkiem i obchodzić się z nim delikatnie. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (temperatura: -20-45°C), wilgotność względna: 10~93% RH), ciśnienie atmosferyczne 190,0-1060 hPa. Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 45°C, np. w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pojeździe.

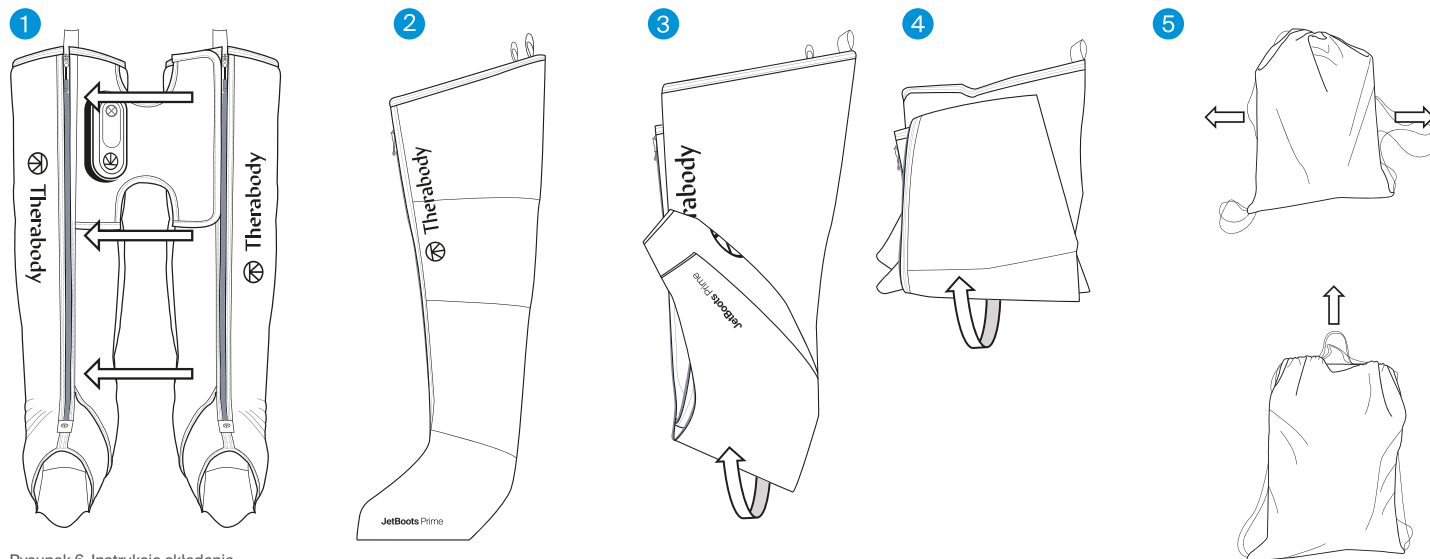

Rysunek 6. Instrukcje składania

Rozwiązywanie problemów

SCENARIUSZ	POTENCJALNE PRZYCZYNY	POTENCJALNE ROZWIĄZANIA
Urządzenie nie włącza się.	Brak zasilania elektrycznego i rozładowanie baterii w urządzeniu	1. Użyj dostarczonego kabla ładującego USB-C i zasilacza USB-C 20 W, aby podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego. Sprawdź, czy urządzenie ładuje się lub włącza. Uwaga: korzystanie z zasilaczy o niższej mocy pozwoli urządzeniu tylko na ładowanie lub pracę, ale nie na oba te procesy jednocześnie. 2. Sprawdź, czy zasilacz, kabel do ładowania i konsola są prawidłowo podłączone. 3. Jeśli urządzenie nie ładuje się po sprawdzeniu wszystkich powyższych czynności, zasilacz lub urządzenie mogą być uszkodzone. Jeśli użycie innego zasilacza nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z Therabody w celu uzyskania dalszej pomocy. Dostępne metody kontaktu można znaleźć na stronie www.weron.pl (dystrybutor na Polskę) lub www.therabody.com (producent).
	Uszkodzony zasilacz lub kabel ładujący USB-C	
	Usterka wewnętrzna	
Urządzenie automatycznie wyłącza się i rozpoczyna ładowanie po podłączeniu do zasilacza USB-C.	Używany zasilacz nie zapewnia wystarczającej mocy do jednoczesnej pracy i ładowania	Sprawdź, czy zasilacz USB-C zapewnia moc co najmniej 20 W. Jeśli jest ona niższa, przed użyciem urządzenia należy je naładować. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z WERON Bartosz Weron (dystrybutorem na Polskę) lub Therabody (producentem) w celu uzyskania dalszej pomocy. Odwiedź www.weron.pl lub www.therabody.com, aby zapoznać się z dostępnymi metodami kontaktu.
Jeden lub oba buty kompresyjne nie napełniają się całkowicie i urządzenie przestaje działać. Wyświetlana jest jedna żółta kontrolka.	Wyciek powietrza na połączeniu węża powietrza lub pęcherzy.	1. Sprawdź połączenia przewodów powietrza. Otwórz czarny zamek błyskawiczny w zewnętrznych kieszeniach znajdujących się po wewnętrznej stronie butów (pod materiałowym "mostkiem"). 2. Sprawdź, czy wężę powietrza są dobrze podłączone do dysz pęcherza powietrza. Jeśli są luźne, wciśnij i podłącz wąż powietrza do dyszy i sprawdź, czy problem został rozwiązany. 3. Jeśli problem nie ustąpi, pęcherze powietrza mogą być uszkodzone. Skontaktuj się z WERON Bartosz Weron (dystrybutorem na Polskę) lub Therabody (producentem), aby uzyskać dalszą pomoc. Dostępne metody kontaktu można znaleźć na stronie www.weron.pl lub www.therabody.com.

Rozwiązywanie problemów (ciąg dalszy)

SCENARIUSZ	POTENCJALNE PRZYCZYNY	POTENCJALNE ROZWIĄZANIA
Jeden lub oba buty nie napętniają się całkowicie i urządzenie przestaje działać. Wyświetlane są dwie żółte diody.	Powietrze nie może przepływać przez węże lub pęcherze powietrza (zagięcie).	1. Upewnij się, że oba buty są prawidłowo założone, a nogi są w pełni wyprostowane. Sprawdź, czy urządzenie nie jest załamane, zagięte lub skręcone. Należy pamiętać, że jeśli rozmiar jest zbyt duży (zbyt długi but), urządzenie może się załamywać i zaginać, prowadząc do dyskomfortu. 2. Sprawdź, czy obszar materiałowego "mostka" łączącego buty nie jest złożony podczas użytkowania. Wyreguluj "mostek" lub pozycję siedzącą, aby upewnić się, że nie jest złożony. Może to prowadzić do załamania przewodu powietrznego. 3. Sprawdź połączenia przewodów powietrznych pod kątem zagięć. Otwórz czarny zamek błyskawiczny w zewnętrznych kieszeniach znajdujących się po wewnętrznej stronie butów (pod "mostkiem"). 4. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z WERON Bartosz Weron (dystrybutorem na Polskę) lub Therabody (producentem), aby uzyskać dalszą pomoc. Dostępne metody kontaktu można znaleźć na stronie www.weron.pl lub www.therabody.com.
Urządzenie przestaje działać i wyświetla dwie migające żółte diody.	Komponenty wewnętrzne przegrzewają się	1. Sprawdź, czy warunki środowiskowe mieszczą się w określonym zakresie. Temperatura pracy: 0-35°C; Wilgotność względna: 30-85% RH; Ciśnienie atmosferyczne: 700-1060 hPa. 2. Należy zaprzestać korzystania z urządzenia i pozostawić je do ostygnięcia na 15 do 20 minut. 3. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z WERON Bartosz Weron (dystrybutorem na Polskę) lub Therabody (producentem), aby uzyskać dalszą pomoc. Dostępne metody kontaktu można znaleźć na stronie www.weron.pl lub www.therabody.com.
Urządzenie przestaje działać i wyświetla trzy migające żółte diody.	Akumulator przegrzewa się	
Urządzenie przestaje działać i wyświetla trzy żółte kontrolki.	Wadliwe działanie komponentu wewnętrznego	Skontaktuj się z WERON Bartosz Weron (dystrybutorem na Polskę) lub Therabody (producentem), aby uzyskać dalszą pomoc. Dostępne metody kontaktu można znaleźć na stronie www.weron.pl lub www.therabody.com .

NIE próbuj rozwiązywać problemów poprzez demontaż urządzenia, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji i może spowodować obrażenia.

Ostrzeżenia i wskazówki (środki ostrożności i przeciwwskazania)

Wprowadzenie

Produkty Therabody mają na celu stymulowanie naturalnej zdolności organizmu do osiągnięcia zdrowia i dobrego samopoczucia. Dzięki nauce i technologii, portfolio produktów Therabody umożliwia dostęp do korzyści terapeutycznych płynących z różnych zjawisk naturalnych, aby zaspokoić indywidualne potrzeby, jak i preferencje. Zdarzają się sytuacje, kiedy wskazane jest zmodyfikowanie sposobu korzystania z urządzeń (środki ostrożności) lub okresy, kiedy nie należy korzystać z niektórych urządzeń (przeciwwskazania). Przed użyciem urządzenia należy w całości zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne zastosowanie urządzenia

Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby w dobrym stanie zdrowia. Urządzenie jest przeciwwskazane i nie powinno być używane przez osoby z epilepsją, drgawkami lub kardiopatią w wywiadzie.

Urządzenie nie jest zalecane dla osób z wszczepionym urządzeniem elektronicznym (takim jak rozrusznik serca), arytmia serca, guzami lub ostrymi epizodami chorób zapalnych. Urządzenie nie jest zalecane dla osób z miażdżycą tętnic, zakrzepami lub implantami w obszarze ciała poddanym zabiegowi.

W przypadku ciąży i/lub karmienia piersią przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia przy pierwszych oznakach dyskomfortu. Urządzenie NIE JEST zabawką. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.

Bezpieczeństwo, środki ostrożności i przeciwwskazania

Specyficzne terapie

Zalecenia te pochodzą z konsultacji z ekspertami medycznymi i opublikowanych badań dotyczących środków ostrożności i przeciwwskazań według stanu na dzień druku. Aktualne informacje można znaleźć na stronie <https://www.therabody.com/us/en-us/precautions-and-contraindications.html>.

Środki ostrożności:

W takich okolicznościach wymagana jest należyta ostrożność, a korzystanie z urządzenia może wymagać modyfikacji. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli obecnie cierpisz lub podejrzewasz, że możesz cierpieć na którekolwiek z poniższych schorzeń lub jeśli masz jakiegokolwiek pytania.

- Nadciśnienie tętnicze (kontrolowane)
- Osteopenia
- Osteoporoza
- Cięża
- Cukrzyca
- Żyłaki
- Narośla kostne
- Nieprawidłowe odczucia (np. drętwienie)
- Wrażliwość na ciśnienie
- Niedawny uraz lub operacja
- Skolioza lub deformacja kręgosłupa
- Leki, które mogą zmieniać odczucia klienta
- Ze względu na przemieszczanie się płynów w organizmie podczas korzystania z urządzenia, należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z chorobami serca. Wysokie ciśnienie nie jest zalecane u pacjentów z chorobą niedrożności obwodowej.

Przeciwwskazania:

Poniżej wymieniono okoliczności, w których potencjalne ryzyko może przewyższać korzyści. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

- Wysypka skórna, otwarte rany, pęcherze, miejscowe stany zapalne tkanek, siniaki lub guzy
- Zakrzepica żył głębokich, zapalenie kości i szpiku
- Złamanie kości lub kostniejące zapalenie mięśni
- Nadciśnienie tętnicze (niekontrolowane)
- Ostra lub ciężka choroba serca, wątroby lub nerek
- Stany neurologiczne powodujące utratę lub zmianę czucia
- Bezpośrednie stosowanie na twarz, gardło lub narządy płciowe
- Zaburzenia krzepliwości krwi
- Niedawna operacja lub uraz
- Schorzenia tkanki łącznej

- Niewydolność lub choroba naczyń obwodowych
- Leki rozrzedzające krew lub zmieniające odczucia
- Bezpośredni nacisk na miejsce zabiegu lub sprzęt
- Bezpośredni nacisk na oczy lub gardło
- Ekstremalny dyskomfort lub ból odczuwany przez klienta
- Ciężka skolioza lub deformacja kręgosłupa
- Rozrusznik serca, ICD lub zator w wywiadzie
- Alergia na materiał urządzenia (nylon)
- Ciąża/karmienie piersią
- Nieprawidłowe odczucia (np. drętwienie)
- Rak/nowotwory
- Padaczka
- Kardiopatia (choroba sercapathy (heart disease)

Ograniczona gwarancja i obsługa klienta

Pełne informacje na temat gwarancji można znaleźć na stronie www.therabody.com/warranty.

Klienci potrzebujący wsparcia produktowego powinni odwiedzić stronę www.weron.pl – polskiego dystrybutora w celu zapoznania z dostępnymi metodami kontaktu.

Zatwierdzony przez FDA

Ograniczona gwarancja tylko przy zakupie u autoryzowanego sprzedawcy
© 2024 Therabody, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Patenty na www.therabody.com/patents

Wyprodukowane i dystrybuowane przez:

Therabody, Inc.
1640 S Sepulveda, Suite 300
Los Angeles, CA 90025

Importerzy:

Therabody International Limited
5th Floor, 40 Mespil Road,
DO4C2N4 Dublin, Ireland

Therabody UK Limited
Portsoken House 155-157, The Minorities
London, United Kingdom, EC3N1LJ

Dystrybucja na Polskę:

WERON Bartosz Weron
Ul. K. Hoffmanowej 21/2
35-016 Rzeszów, Polska

OSTRZEŻENIA

PRZED UŻYCIEM LUB ŁADOWANIEM URZĄDZENIA Therabody JetBoots Prime I JEGO AKCESORIÓW NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, NA ŁADOWARCE ORAZ NA URZĄDZENIU.

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności:

1. UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi Therabody JetBoots Prime. Urządzenie jest przeznaczone do użytku bez recepty czy wskazania. Urządzenie nie jest przeznaczone do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom. Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez Therabody. Urządzenie jest zaawansowanym narzędziem mechanicznym z elementami elektrycznymi. Jeśli urządzenie i jego akcesoria nie są prawidłowo używane lub konserwowane, istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała. Niewłaściwe użytkowanie i konserwacja urządzenia oraz akcesoriów niezgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji spowoduje utratę gwarancji i może skutkować uszkodzeniem produktu lub obrażeniami ciała. Urządzenie jest przeznaczone do użytku komercyjnego i domowego.
2. NIE DLA DZIECI. Urządzenie i jego akcesoria nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia. Urządzenie i akcesoria nie są przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub rozumowania, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane o zasadach dotyczących korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za jej bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Należy poinformować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem ani akcesoriami.
3. NIE STAWAJ PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA. Nie należy próbować wstawiać podczas korzystania z urządzenia. Wstawanie podczas korzystania z urządzenia może prowadzić do dyskomfortu, upadku i uszkodzenia wewnętrznych elementów urządzenia.
4. ŁADOWANIE. Jeśli urządzenie nie włącza się lub wskaźnik baterii wskazuje niski poziom naładowania, przed pierwszym użyciem należy naładować baterię. Baterię

należy ładować za pomocą kabla USB-C (w zestawie). W przypadku korzystania z kabla do ładowania (w zestawie) należy upewnić się, że jego złącze USB-C jest całkowicie włożone do kompatybilnego zasilacza przed podłączeniem zasilacza do gniazdka elektrycznego. Baterię można również ładować za pomocą kabli i innych firm, które są zgodne z normami USB-C oraz z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi i regionalnymi normami bezpieczeństwa. Inne adaptery mogą nie spełniać obowiązujących norm bezpieczeństwa, a ładowanie za ich pomocą może stwarzać ryzyko śmierci lub obrażeń. Nie należy wciskać kabla na siłę. Urządzenie należy ładować do pełna co najmniej raz na sześć miesięcy, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i baterii. Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć zasilacz i kabel do ładowania.

5. NIE PRZEŁADOWYWAĆ. Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilacza na dłużej niż godzinę po całkowitym naładowaniu baterii. Bateria posiada system zabezpieczający przed ryzykiem przeładowania. Przeładowanie może jednak z czasem skrócić jej żywotność.

6. MIEJSCE ŁADOWANIA. Urządzenie należy ładować za pomocą zasilacza i kabla do ładowania. Należy unikać kontaktu ze skórą, gdy złącze USB-C jest podłączone do źródła zasilania, ponieważ może to spowodować dyskomfort lub obrażenia. Nie wolno spać ani siadać na złączu USB-C. Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu. Nie należy ładować urządzenia na zewnątrz, w łazience ani w odległości mniejszej niż 10 stóp (3,1 metra) od wanny lub basenu. Nie używaj urządzenia ani ładowarki na mokrych powierzchniach i nie narażać jej na działanie wilgoci, deszczu lub śniegu. Nie używaj urządzenia ani kompatybilnej z nim ładowarki w obecności atmosfery wybuchowej (opary gazowe, pył, ziarna, proszki metali lub materiały łatwopalne). Może to spowodować iskrzenie, a w konsekwencji pożar.

7. ODŁĄCZANIE ŁADOWARKI I PIELEGNACJA. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wtyczki i przewodu, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. Nigdy nie przenosić ładowarki za przewód. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju i ostrych przedmiotów krawędzie. Nie rozciągać przewodu ładowarki ani nie narażać go na naprężenia. Nie należy obsługiwać ładowarki, zacisków ani urządzenia mokrymi rękami. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem. Kabel należy przechowywać w taki sposób, aby nie nadepnąć na niego, nie potknąć się o niego ani w żaden inny sposób nie narażać go na uszkodzenie lub naprężenie. Nie używaj zasilacza ani kabla do ładowania, który został uderzony ostrym narzędziem, upuszczony, przejechany lub uszkodzony w jakikolwiek inny sposób. W przypadku długotrwałego przechowywania należy przechowywać urządzenie z w pełni naładowaną baterią.

8. UŻYTKOWANIE. W przypadku odczuwania bólu lub dyskomfortu należy przerwać korzystanie z urządzenia. Jeśli w dowolnym momencie podczas zabiegu odczuwasz

ból lub dyskomfort wykraczający poza to, czego można oczekiwać od urządzenia uciskowego lub masażu, natychmiast przerwij zabieg i wyjmij urządzenie. Jeśli urządzenie przegrzeje się lub stanie się nieprzyjemnie gorące, należy przerwać korzystanie z niego. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między skórą a urządzeniem.

9. NIE UŻYWAĆ POD KOCEM I PODUSZKĄ. Nadmierne nagrzewanie może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

10. KONSERWACJA I SERWISOWANIE URZĄDZENIA. Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Urządzenie zawiera elementy elektroniczne, które mogą ulec uszkodzeniu w przypadku upuszczenia, spalenia, przebicia lub zgniecenia. Nie należy demontować urządzenia ani podejmować prób jego samodzielnej naprawy. Demontaż urządzenia może spowodować jego uszkodzenie i obrażenia ciała. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Therabody. Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli urządzenie, baterie lub ładowarka zostaną zdemontowane lub jeśli zostaną usunięte jakiejkolwiek części. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, ponieważ może to spowodować obrażenia. Nie dziurawić ani nie uszkadzać urządzenia. Przebicie urządzenia może prowadzić do jego nieprawidłowego działania. Urządzenie NIE jest wodoodporne. Urządzenia nie można prac w palce. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscach, w których może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu. Nie wkładać ani nie upuszczać urządzenia do wody lub innych płynów. Nie sięgać po urządzenie, które wpadło do wody lub miało z nią kontakt. Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania. Urządzenie należy czyścić zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale "Czyszczenie" w instrukcji obsługi.

11. CHEMIKALIA AKUMULATORA POWODUJĄ POWAŻNE OPARZENIA. Nie wolno dopuścić do kontaktu wewnętrznego akumulatora ze skórą, oczami lub ustami. Jeśli z uszkodzonego akumulatora wyciekną chemikalia, do jego utylizacji należy użyć gumowych lub neoprenowych rękawic. W przypadku kontaktu skóry z płynami z akumulatora należy umyć ją wodą z mydłem i spłukać octem. W przypadku kontaktu oczu z chemikaliami z akumulatora, natychmiast płukać je wodą przez 20 minut i skontaktować się z lekarzem. Zdjąć i zutylizować zanieczyszczoną odzież.

12. NIE POWODOWAĆ ZWARCIA. Bateria ulegnie zwarceniu, jeśli metalowy przedmiot połączy dodatnie i ujemne styki baterii lub złącza 16V. Nie należy umieszczać akumulatora w pobliżu przedmiotów, które mogą spowodować zwarcie, takich jak monety, klucze lub gwoździe w kieszeni. Zwarcie akumulatora może spowodować pożar i obrażenia ciała.

13. PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA I AKCESORIÓW. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Urządzenie należy ładować wyłącznie w temperaturze otoczenia wynoszącej -4-113°F (-20-45°C). Nie należy przechowywać urządzenia ani kabla do ładowania w miejscach, w których

temperatury mogą przekraczać 45°C (113°F), np. w bezpośrednim świetle słonecznym, w pojeździe lub w metalowym budynku w okresie letnim. Należy unikać ciasnego zwijania urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych komponentów.

14. UTYLIZACJA URZĄDZENIA. To urządzenie zawiera baterię litowo-jonową i należy zachować ostrożność podczas jego utylizacji. Przed utylizacją urządzenia należy zapoznać się z lokalnymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi utylizacji baterii litowo-jonowych. Preferowaną metodą utylizacji jest recykling całego urządzenia.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych do FDA

MedWatch to program Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) służący do zgłaszania poważnych reakcji, problemów z jakością produktów, braku równoważności terapeutycznej oraz błędów w stosowaniu produktów medycznych przeznaczonych dla ludzi, w tym leków, produktów biologicznych, wyrobów medycznych, suplementów diety, preparatów dla niemowląt i kosmetyków.

Jeśli uważasz, że Ty lub ktoś z Twojej rodziny doświadczył poważnej reakcji na produkt medyczny, zachęcamy do zabrania formularza zgłoszeniowego do lekarza. Świadczeniodawca opieki zdrowotnej może dostarczyć informacji klinicznych na podstawie dokumentacji medycznej, które mogą pomóc FDA w ocenie zgłoszenia. Rozumiemy jednak, że z różnych powodów możesz nie chcieć, aby formularz został wypełniony przez Twojego lekarza. Świadczeniodawca lub świadczeniodawca opieki zdrowotnej może zrezygnować z wypełnienia formularza. Świadczeniodawca opieki zdrowotnej nie jest zobowiązany do składania raportu do FDA. W takich sytuacjach można samodzielnie wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy.

Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie od FDA. Raporty są przeglądane przez pracowników FDA. Osobiście skontaktujemy się z Tobą tylko wtedy, gdy będziemy potrzebować dodatkowych informacji.

Przesyłanie raportów o zdarzeniach niepożądanych do FDA

Użyj jednej z poniższych metod, aby przesłać dobrowolne raporty o zdarzeniach niepożądanych do FDA:

1. Raport dostępny na stronie: www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/index.cfm?action=reporting.home
2. Formularz zgłoszenia konsumenta FDA 3500B. Postępuj zgodnie z instrukcjami na formularzu, aby go przesłać faksem lub pocztą. Pomoc w wypełnieniu formularza

można znaleźć na stronie MedWatchLearn. Formularz jest dostępny pod adresem: www.fda.gov/downloads/aboutFDA/reportsmanualsforms/forms/ucm349464.pdf

3. Zadzwoń do FDA pod numer 1-800-FDA-1088, aby dokonać zgłoszenia telefonicznie.

4. Formularz sprawozdawczy FDA 3500 powszechnie używany przez pracowników służby zdrowia. Formularz jest dostępny pod adresem: www.fda.gov/downloads/aboutFDA/reportmanualsforms/forms/ucm163919.pdf

PIELĘGNACJA MANKIETÓW.

Znaczenie symboli

Oznaczenia

SYMBOLE	OPIS	LOKALIZACJA
IP 22	Stopień ochrony przed wnikaniem wody	Na etykiecie znamionowej
	Przed użyciem przeczytaj instrukcję	Na etykiecie znamionowej
	Stopień ochrony części przyłączowej typu BF	Na etykiecie znamionowej
	Therabody, Inc. 1640 S. Sepulveda Blvd. Suite 300 Los Angeles, CA 90025	Na etykiecie znamionowej
 UDI: (01) 508110036056908 (10) 2143 (21) 00001	Unikalny identyfikator urządzenia (UDI)	Na etykiecie znamionowej i opakowaniu
	Oddzielna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji sprzętu, jego części i akcesoriów, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.	Na etykiecie znamionowej



Therabody

Stworzony w Los Angeles, Kalifornia.
Zaprojektowany **dla każdego.**



@Therabody

OFICJALNY POLSKI DYSTRYBUTOR
WERON Bartosz Weron
ul. Hoffamnowej 21/2, 35-016 Rzeszów
tel: +48 17 855 46 48
info@weron.pl

OFICJALNA WYPOŻYCZALNIA
STREFA REGENERACJI S.C.
ul. T. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów
tel: +48 606 106 366
www.strefaregeneracji.pl