

PRODUCENT: POSTUREPALS PTY LTD Law Partners House, Kumul Highway Port Vila, Vanuat	IMPORTER I DYSTRYBUTOR: STREFA REGENERACJI S.C. ul. Boya-Żeleńskiego 25 35-105 Rzeszów
---	--

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady stosowania

Taśma biomechaniczna Dynamic Tape jest specjalistycznym produktem przeznaczonym do wspomagania procesów rehabilitacyjnych, zmniejszania bólu oraz poprawy stabilności i mobilności tkanek. Taśma działa na zasadzie wspierania naturalnych ruchów ciała, bez ograniczania pełnej swobody ruchu. Zaleca się stosowanie taśmy na skórze w okolicach problematycznych obszarów ciała, takich jak stawy, mięśnie i ścięgna.

Środki ostrożności

- Należy unikać aplikowania taśmy na skórze, jeśli osoba wykazuje reakcje alergiczne na jakikolwiek składnik taśmy.
- Nie stosować taśmy na wrażliwe miejsca, takie jak okolice oczu, twarzy czy narządów płciowych.
- Taśma powinna być stosowana tylko na nieuszkodzonej skórze; nie należy aplikować jej na rany, otarcia, oparzenia lub stany zapalne skóry.
- Przed aplikacją taśmy warto wykonać test, poprzez naklejenie fragmentu taśmy na skórę na krótki czas i sprawdzenie, czy występuje reakcja alergiczna.
- Zaleca się odbycie przeszkolenia z zakresu Dynamic Tape przed użyciem.
- NIE rozciągać taśmy zbyt mocno. Nadmierne rozciągnięcie może prowadzić do powstania pęcherzy.

- Natychmiast usunąć taśmę, zaprzestać jej stosowania i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia świądu, pieczenia, klucia, wysypki, zaczerwienienia lub podrażnienia.
- Przed aplikacją należy oczyścić i osuszyć skóry (usunąć kremy, balsamy i oleje) oraz nie stosować na owłosioną skórę.

Przeciwwskazania

- Reakcje alergiczne lub nadwrażliwość na składniki taśmy.
- Zastosowanie na otwarte rany, oparzenia, egzemy lub inne uszkodzenia skóry.
- Osoby z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub skłonnościami do siniaków powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem taśmy.
- Nie stosować taśmy w przypadku stanów zapalnych skóry, takich jak infekcje bakteryjne, wirusowe czy grzybicze.
- Niezagojone rany i uszkodzenia skóry w miejscu aplikacji.
- Owrzodzenia, oparzenia słońcem.
- Zakrzepica żył głębokich.
- Nowotwór skóry.

Stosowanie u dzieci

- Taśma Dynamic Tape może być stosowana u dzieci, jednak należy zachować szczególną ostrożność.
- Zaleca się, aby aplikacja taśmy u dzieci była przeprowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę, takiego jak fizjoterapeuta lub lekarz.
- Należy upewnić się, że taśma nie powoduje podrażnień skóry dziecka. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy natychmiast usunąć taśmę.
- Dzieci powinny nosić taśmę tylko pod nadzorem dorosłych, aby uniknąć nieprawidłowego stosowania.

Przechowywanie produktu

- Przechowywać taśmę w oryginalnym opakowaniu w suchym, chłodnym miejscu.
- Należy unikać narażania taśmy na bezpośrednie działanie wysokich temperatur, wilgoci oraz promieni słonecznych.
- Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla dzieci.
- Data ważności taśmy powinna być sprawdzona przed jej użyciem. Należy unikać stosowania przeterminowanego produktu.