

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady stosowania

Taping sztywny (medyczny) jest przeznaczony do stabilizacji, unieruchomienia oraz ochrony stawów, więzadeł i mięśni. Produkt może być stosowany w terapii pourazowej oraz w celach profilaktycznych w sporcie i rehabilitacji. Powinien być aplikowany na czystą, suchą skórę, wolną od olejków i balsamów, aby zapewnić odpowiednie przyleganie. Przed pierwszym użyciem zaleca się konsultację z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Środki ostrożności

- Nie stosować na otwarte rany, uszkodzoną skórę ani w przypadku infekcji skórnych.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej (zaczerwienienie, swędzenie, opuchlizna), natychmiast usunąć tejp i skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować przez dłuższy czas bez przerwy – stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty.
- Przed aplikacją należy nałożyć podkład piankowy lub włókninowy, który stanowi zabezpieczenie przed otarciami.

Przeciwwskazania

Taping sztywny nie powinien być stosowany w następujących przypadkach:

- Nadwrażliwość na lateks lub inne składniki materiału.
- Zaburzenia krążenia lub choroby naczyń krwionośnych.
- Ciężkie urazy wymagające specjalistycznego unieruchomienia (np. złamania).
- Uszkodzenia chrząstki stawowej.
- Oparzenia i owrzodzenia.
- Krwiaki w miejscu planowanej aplikacji taśmy.
- Duże rany oraz przerwana ciągłość skóry.
- Ostra reakcja alergiczna lub nadwrażliwość skórna.

Stosowanie u dzieci

Taping sztywny może być stosowany u dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i po konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie powodować nadmiernego ucisku i ograniczenia krążenia.

Przechowywanie produktu

Taping sztywny należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz źródeł ciepła. Chronić przed wilgocią i skrajnie niskimi temperaturami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, aby zapewnić ochronę przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.