

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady stosowania

- Taśmy kinesjologiczne są przeznaczone do stosowania w celu wsparcia mięśni i stawów, poprawy krążenia oraz łagodzenia dolegliwości bólowych.
- Przed aplikacją skóra powinna być czysta, sucha i pozbawiona olejków lub kremów.
- Aplikacja taśmy powinna być zgodna z zaleceniami specjalisty (fizjoterapeuty, lekarza lub trenera sportowego) lub wykonana bezpośrednio przez specjalistę.
- W przypadku pierwszego użycia zaleca się przeprowadzenie testu na małym fragmencie skóry w celu wykluczenia reakcji alergicznej.
- Taśmy kinesjologiczne powinno naklejać się na nie owłosioną skórę.

Środki ostrożności

- Unikać stosowania taśmy na otwarte rany, podrażnioną skórę, oparzenia lub wysypki.
- W przypadku wystąpienia swędzenia, zaczerwienienia lub innych reakcji skórnych należy natychmiast usunąć taśmę i skonsultować się ze specjalistą.
- Nie należy stosować taśmy w sposób powodujący nadmierne napięcie skóry lub ograniczenie krążenia krwi.
- Usuwanie taśmy powinno odbywać się delikatnie, najlepiej po wcześniejszym zwilżeniu jej wodą lub olejkim.
- W przypadku nowotworu należy skonsultować się z lekarzem.
- Zalecane jest unikanie długotrwałego moczenia i mydlenia, ponieważ mogą one spowodować szybsze odklejanie taśmy. Po zamoczeniu należy docisnąć ręcznik do plastra, aby odsączyć go z wody. Nie pocierać.
- Należy uważać na przypadkowe zadarcie brzegów i odklejanie taśmy.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na zastosowany klej.
- Problemy skórne, takie jak egzema, łuszczyca lub inne przewlekłe choroby dermatologiczne.
- Osoby z zakrzepicą żylną lub innymi zaburzeniami krążenia powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem taśmy.
- Nie stosować w przypadku złamań (w tym źle zrośniętych), świeżych urazów, ostrych stanów zapalnych oraz w przypadku świeżych blizn pooperacyjnych bez konsultacji medycznej.
- Nie stosować świeżo po wykonanym tatuażu.
- Żylaki.
- Cukrzyca.

- Tętniaki.

Stosowanie u dzieci

- Taśmy mogą być stosowane u dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i po konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na delikatność skóry dziecka i unikać długotrwałego stosowania.

Przechowywanie produktu

- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Chronić przed wilgocią, aby zachować właściwości klejące taśmy.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć zabrudzenia lub uszkodzenia materiału.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu spożyciu lub niewłaściwemu użyciu.