

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady stosowania

- Stabilizatory i ochraniacze powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, określonym w instrukcji użytkowania.
- Produkty mogą być wykorzystywane w celach profilaktycznych, rehabilitacyjnych oraz ochronnych podczas aktywności fizycznej.
- Przed rozpoczęciem użytkowania zaleca się konsultację z lekarzem lub specjalistą w przypadku urazów lub schorzeń wymagających stabilizacji.
- Nie należy modyfikować ani używać produktów w sposób niezgodny z instrukcją, gdyż może to wpłynąć na ich skuteczność i bezpieczeństwo.
- Produkt nie zastępuje opieki medycznej. Zawsze zasięgaj profesjonalnej porady medycznej w celu diagnozy i leczenia bólu, urazów lub podrażnień.
- Używaj zgodnie z zaleceniami i nie przekraczaj zalecanego czasu użycia, aby uniknąć potencjalnego podrażnienia skóry lub urazu.

Środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub wad fabrycznych.
- W przypadku wystąpienia bólu, podrażnienia skóry lub innego dyskomfortu, należy zaprzestać użytkowania produktu i skonsultować się z lekarzem.
- Stabilizatory i ochraniacze nie powinny być stosowane na otwarte rany ani w przypadku stanów zapalnych skóry.
- Produkt powinien być odpowiednio dopasowany do użytkownika – zbyt luźne lub zbyt ciasne dopasowanie może prowadzić do ograniczenia skuteczności działania lub dyskomfortu.
- Nie nosić podczas snu.
- Podczas noszenia, szczególnie podczas początkowego użytkowania, regularnie sprawdzaj skórę.
- Jeśli problem nie ustępuje lub się nasila, skontaktuj się z lekarzem.

Przeciwwskazania

- Produkt nie powinien być stosowany przez osoby ze skłonnością do reakcji alergicznych na materiały użyte w jego produkcji.
- Osoby cierpiące na poważne zaburzenia krążeniowe powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem stabilizatorów i ochraniaczy.

- Stabilizatory nie powinny być używane w przypadku złamań kości bądź innych poważnych urazów bez wcześniejszego zalecenia medycznego.

Pranie i pielęgnacja produktu

- Produkty należy czyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, stosując się do zaleceń dotyczących temperatury prania i używania detergentów.
- Zaleca się pranie ręczne lub w pralce na delikatnym programie, z użyciem łagodnych środków piorących, bez wybielaczy i środków zmiękczających.
- Stabilizatory i ochraniacze należy suszyć w temperaturze pokojowej, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz suszarek bębnowych.
- Produktu nie należy prasować ani czyścić chemicznie, gdyż może to wpłynąć na jego trwałość i właściwości użytkowe.